


# Swing Phase Lock 2 - C.O.S.<sup>TM</sup>-Ganzbein-Karbonorthese

---


## Montageanleitung für Verschlussgurte

Pos.	Anzahl	Beschreibung	Breite
1	3	Verschlussband aus doppelseitigem Flausch, lang	35 mm
2	3	Verschlussband aus doppelseitigem Klett, kurz	35 mm
3	3	Krokodil-Clip für Verschlussband	30 mm
4	3	Verschlussband-Polster mit Silikon	50 mm

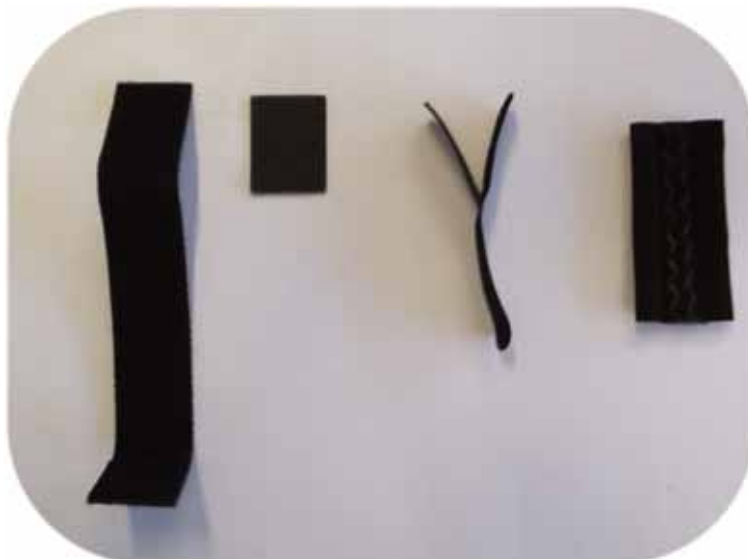

Pos.1    Pos.2    Pos. 3    Pos 4

1. Kletten Sie das Krokodil-Clip-Verschlussband (Pos. 3) mit der Schnabelseite an ein Ende des langen Verschlussbandes aus doppelseitigem Flausch (Pos.1):

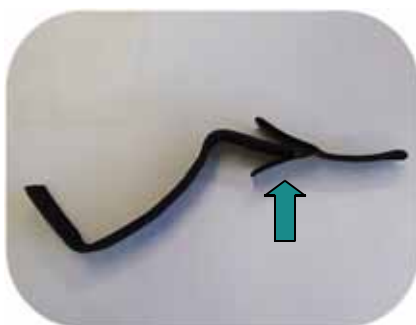

2. Legen Sie das lange Verschlussband aus doppelseitigem Flausch

so vor sich, dass die Klettseite des Krokodil-Clip nach oben zeigt.




3. Kletten Sie das Verschlussband aus doppelseitigem Klett (Pos. 2) ca. 6 cm von der Schnittkante entfernt an das andere Ende des Verschlussbandes aus doppelseitigem Flausch (Pos.1). (Klett zeigt in dieselbe Richtung wie Klettseite des Krokodil-Clips)



4. Führen Sie das Ende des Verschlussbandes (Pos. 1) in die Metallschnalle an der Orthese und verschließen diese so, dass das Verschlussband mit doppelseitigem Klett bündig abgedeckt ist.



5. Kletten Sie das Verschlussband-Polster mit Silikon (Pos. 4) auf die Innenseite des Verschlusses. Schneiden Sie das Verschlussband-Polster mit Silikon (Pos. 4) für Ihren Patienten individuell zu.

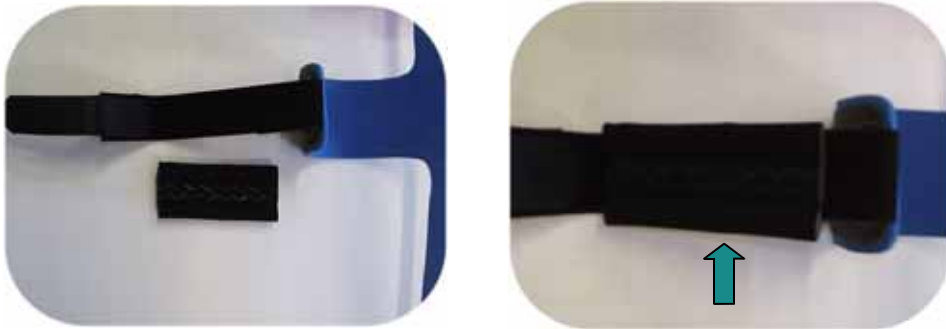

6. Kürzen Sie bei Bedarf das lange Verschlussband (Pos. 1) an der Seite der Umlenkschleife und verschieben Sie das Doppelklettband entsprechend.