

4-Foot-Vorfußüberzug für NAVIGAIT



 Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38
SE-254 67 Helsingborg, Sweden
 Phone: +46 42 25 27 01

Gebrauchsanleitung

Anwendungshinweise

Ihr Arzt verschreibt und bestimmt die Behandlungsdauer. Die ärztliche Verordnung zur täglichen Gebrauchsdauer muss genau beachtet werden. Achten Sie regelmäßig darauf, ob sich Druckstellen oder Hautreizungen bilden und kontaktieren Sie ggf. Ihren Arzt und Techniker.

Zweckbestimmung des Produktes / Indikationen

Dieses Produkt sollte nur in Kombination mit der NaviGAIT verwendet werden (Art.-Nr. 8620). Mit diesem fußumfassenden leicht komprimierenden Überzug kann die NAVIGAIT auch Barfuß oder in Sandalen getragen werden.

Zulässige Betriebsbedingungen / Einsatzorte

Der Überzug darf nicht im Salzwasser eingesetzt werden.

Bestehende Anwendungsrisiken

Kontraindikationen:

- Kreislaufbeschwerden
- Offene Wunden
- Ödeme oder Schwellungen (Fuß)

Es sind keine weiteren Anwendungsrisiken bekannt.

Angabe des verwendeten Materials

Obermaterial und Futter: Elastan, Polyester; Füllung: Polyurethane; Öse: Stahl;
Riemen: Polyamide, Elastan, Silikon; Nahtband: Polyamide, Elastan; Innensohle:
Polyester

Wartungshinweise

Der Überzug muss vor Verschmutzungen, Stoffresten etc. geschützt werden, um ein einwandfreie Funktionalität zu garantieren.

Zusammenbau- und Montageanweisungen

Maßnahmen

Für das exakte Maß messen Sie den Vorfußumfang.

Anlegen des Überzugs

- Stecken Sie Ihren Fuß in den Überzug - wie in einen Strumpf - und ziehen Sie diesen soweit hoch, dass die Zehen, mit Ausnahme des kleinen Zehs, sichtbar sind. Achten Sie darauf, dass die integrierte Öse richtig auf dem Fußrücken positioniert ist.
- Haken Sie jetzt den Kunststoff-Hakenverschluss des Zuggurtes fest an die integrierte Öse des Überzugs, um die Wirkung zu garantieren. Kontrollieren Sie den Stand des Fußes beim Gehen und passen Sie ggf. die Spannung des Zuggurtes an, damit die optimale Wirkung des Überzugs gewährleistet ist.

Reinigungshinweise


Wir empfehlen, den Überzug mit 40°C warmem Wasser mit Feinwaschmittel zu reinigen und liegend zu trocknen. Nicht chemisch reinigen. Nicht bleichen.

Nicht geeignet für den Trockner. Nicht bügeln.



Maßtabelle

Artikelnummer	Größe	Vorfußumfang
28415	small	21 - 23 cm
	medium	23 - 26 cm
	large	26 - 29 cm

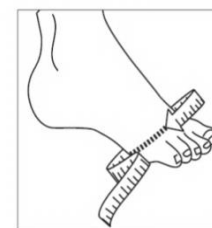




allard_N

NAVIGAIT™ 4-FOOT



Item No:
28415

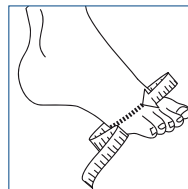

Small, 21-23cm

Medium, 23-26cm

Large, 26-29cm



Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38
SE-254 67 Helsingborg, Sweden
Phone: +46 42 25 27 01

www.allardint.com





NAVIGAIT™ 4-FOOT

Avsedd användning/ Bruksområde/ Anvendelse/Käyttötarkoitus/Intended Use Beoogd gebruik/Zweckbestimmung/Avvertenze:

Denna produkt skall enbart användas i kombination med NaviGAIT, artikel 28410.

Dette produktet skal kun brukes i kombinasjon med NaviGAIT, art.nr: 28410.

Dette produkt skal udelukkende anvendes sammen med artikel 28410.

Tätä tuotetta käytetään vain yhdessä NaviGaitin, tuotenumero 28410, kanssa.

This product should only be used in combination with NaviGAIT Item No. 28410.

Dit product mag alleen gebruikt worden in combinatie met de NaviGAIT, art. nr: 8620.

Dieses Produkt sollte nur in Kombination mit der NaviGAIT verwendet werden, Art.-Nr. 8620.

Questo prodotto può essere utilizzato solamente in combinazione con NaviGAIT art. 28410.

Kontraindikationer/ Kontraindikasjoner/Kontraindikaatitot /Contraindications Contra-indicaties/Kontraindikationen/Controindicazioni:

Cirkulationsproblem, öppna fotsår, ødem eller svullnad.

Sirkulasjonsproblemer; åpne fotsår; ødem eller hevelse.

Cirkulationsproblemer; åbne fodsår; ødem eller hævelse.

Verenkiertohäiriöt, jalan avohaavat, ødeema tai turvotus.

Circulation problems, open foot-wounds, edema or swelling.

Problemen met de bloedsomloop, open wonden, oedeem of zwellling (voet).

Kreislaufbeschwerden, offene Wunden, Ödeme oder Schwellungen (Fuß).

Problemi di circolazione, ferite aperte, edemi o gonfiori.

allard|^N_T

www.allardint.com

Tel +46 42 25 27 00
Fax +46 42 25 27 25

ALLARD INTERNATIONAL
Camp Scandinavia AB
Karbingatan 38
SE-254 67 Helsingborg SWEDEN
mail.sweden@camp.se

