

NAVIGAIT™ - Gebrauchsanleitung

Anwendungshinweise

Ihr Arzt verschreibt die NAVIGAIT™-Fußheberorthese und bestimmt die Behandlungsdauer. Die ärztliche Verordnung zur täglichen Gebrauchsdauer muss genau beachtet werden. Achten Sie regelmäßig darauf, ob sich Druckstellen oder Hautreizungen bilden und kontaktieren Sie ggf. den Arzt und Techniker. Der Einsatz ist nur zur Anwendung an einem Patienten erlaubt und nach abgeschlossener Behandlung nicht wiedereinsatzfähig.

Zweckbestimmung des Produktes / Indikationen

Die Orthese NAVIGAIT™-Fußheberorthese wird bei Patienten mit leichter Fußheberschwäche angewandt. Mit dem Einsatz wird eine bessere Dorsalflexion und damit ein stabileres und sichereres Gangbild erreicht. Die Anwendung erfolgt bei folgenden Indikationen:

- Apoplexie (Schlaganfall) (ICD10: I64)
- Multiple Sklerose (ICD10: G35)
- Postpolio-Syndrom (ICD10: B91)

Zulässige Betriebsbedingungen / Einsatzorte

Die Orthese darf nicht im Salzwasser eingesetzt werden.

Bestehende Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

Kontraindikation:

- Spastik (ICD10: R25.2)

Darüber hinaus darf die Orthese nicht auf Druckstellen oder gereizter Haut getragen werden.

Wartungshinweise

Die Klettbänder sollten vor Verschmutzungen, Stoffresten etc. geschützt werden, um eine gute Haftung zu garantieren