

Maattabel ATX-voetmanchet / Maßtabelle ATX- Mittelfußmanschette

Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	Per / VE	Maat / Größe	Zijde / Seite	Omvang / Umfang
ATX11L-S	ATX11R-S	Stuk/Stück	small	universeel / universell	17 - 21 cm
ATX11L-M	ATX11R-M	Stuk/Stück	medium	universeel / universell	21 - 25 cm
ATX11L-L	ATX11R-L	Stuk/Stück	large	universeel / universell	25 - 29 cm

Maat nemen: circulair, boven de enkel

Maßnehmen: zirkulär, oberhalb des Knöchels



*) Bei Abrechnung in Deutschland

ATX

Voetmanchet

Mittelfußmanschette HMV Pos.-Nr.: 23.03.02.0012 *



Gebruiksrichtlijnen

Uw arts schrijft de voethefferorthese met voetmanchet voor en bepaald de behandelduur. De gestelde dagelijkse gebruiksduur dient strikt nageleefd te worden. Controleer regelmatig uw huid op drukplekken of irritaties en neem direct contact op met uw arts of instrumentmaker indien dit het geval is. De voetmanchet is niet geschikt voor gebruik door meerdere personen.

Beoogd gebruik van het product / Indicaties

De ATX-voetmanchet wordt ingezet bij patiënten die de ATX-voetheffer orthese blootvoets, op sokken of sandalen willen gebruiken. De orthese biedt een dynamische ondersteuning van de dorsiflexie en daarmee een stabiel en gecontroleerd looppatroon. De orthese wordt bij onderstaande indicaties ingezet:

- Apoplexie (hersenvloeding) (ICD10: I64)
- Multiple Sclerose (ICD10: G35)

Extra productinformatie / inzetgebied

De orthese en de voetmanchet zijn niet geschikt om in zout water gebruikt te worden.

Gebruikersrisico's en contra-indicaties

De orthese en voetmanchet mogen niet op drukplekken of andere geïrriteerde huid gedragen worden. Overige contra-indicaties zijn:

- Gemiddeld tot zwaar spasme
- Ernstige enkelinstabiliteit
- Veneuze/lymfatische reflux problemen
- huidirritatie in het drukgebied

Onderhoudsadvies

De klittenbanden dienen vrij te blijven van vervuiling, stofresten e.d. om een goede hechting te blijven garanderen.

Levering

1 ATX-voetmanchet

Aanleggen / aanpassen

De voetmanchet wordt gebruiksklaar geleverd maar dient bij het voor de eerste maal omdoen van de manchet door een instrumentmaker of ander vak personeel uitgelegd te worden. Controleer of er na het omdoen van de manchet eventuele drukplekken ontstaan.

Maatnemen

Voor de exacte maatbepaling meet u de wreefomvang.

Aanleggen van de overtrek

1. Neem de voorvoetovertrek uit de verpakking en open de klittenbandsluitingen (A). Positioneer de overtrek om de voet en let daarbij op dat de geïntegreerde pelotte (B) het voetbed afdekt en dat het geïntegreerde haakje (C) correct over de wreef, met de opening naar beneden is gepositioneerd.
2. Haak vervolgens het trekkoord achter het geïntegreerde haakje van de overtrek vast om een juiste werking te garanderen.



Controleer de stand van de voet tijdens het lopen en pas eventueel de spanning van het trekkoord aan om een optimale werking te kunnen waarborgen.

Gebruikte materialen

Polyamide, polyurethaan, katoen, elasthan, staal.

Reinigingsvoorschriften

Handwas in max. 30°C water. Niet bleken. Niet chemisch reinigen. Niet geschikt voor de droger. Sluit voor het wassen alle klittenbanden ter voorkoming van beschadigingen aan andere kledingstukken en voor een optimale hechting van de klittenbanden.

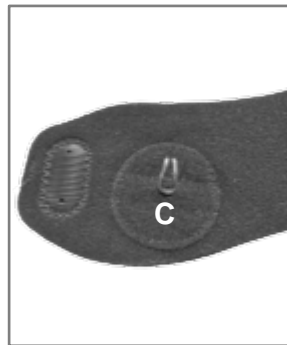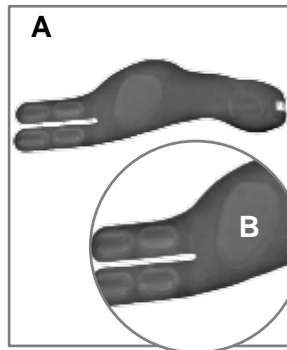

Anwendungshinweise

Ihr Arzt verschreibt die Fußheberorthese mit Mittelfußmanschette und bestimmt die Behandlungsdauer. Die ärztliche Verordnung zur täglichen Verordnung zur täglichen Gebrauchsdauer muss genau beachtet werden. Achten Sie regelmäßig darauf, ob sich Druckstellen oder Hautreizungen bilden und kontaktieren Sie ggf. Ihren Arzt und Techniker. Die Mittelfußmanschette ist nicht für den Wiedereinsatz geeignet.

Zweckbestimmung des Produktes / Indikationen

Die ATX-Mittelfußmanschette wird bei Patienten angewandt, welche die ATX-Fußheberorthese barfuß, mit Strümpfen oder Sandalen tragen möchten. Die Orthese bietet eine dynamische Unterstützung der Dorsalflexion und damit ein stabileres und sichereres Gangbild. Die Anwendung erfolgt bei folgenden Indikationen:

- Apoplexie (Schlaganfall) (ICD10: I64)
- Multiple Sklerose (ICD10: G35)

Zulässige Betriebsbedingungen / Einsatzorte

Die Orthese und Mittelfußmanschette dürfen nicht im Salzwasser eingesetzt werden.

Bestehende Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

Die Orthese und Mittelfußmanschette dürfen nicht auf Druckstellen oder gereizter Haut getragen werden. Sonstige Kontraindikationen:

- Moderate bis schwere Spastik
- Schwere Instabilität des Sprunggelenks
- Venöses/lymphatisches Rückfluss-Problem
- Hautirritation im Druckbereich

Wartungshinweise

Die Klettbinden sollten vor Verschmutzungen, Stoffresten etc. geschützt werden, um eine gute Haftung zu garantieren.

Lieferumfang

1 ATX-Mittelfußmanschette

Anlegen / Anpassen

Die Mittelfußmanschette wird gebrauchsfertig ausgeliefert, jedoch sollte das Anlegen bei der ersten Anpassung durch einen Techniker oder das Fachpersonal erklärt werden. Kontrollieren Sie, nach Anlegen der Mittelfußmanschette, ob evtl. Druckstellen auftreten.

Maßnahmen

Für das exakte Maß messen Sie den Spannumfang.

Anlegen der Mittelfußmanschette

1. Nehmen Sie Mittelfußmanschette aus der Verpackung und öffnen Sie die Klettverschlüsse (A). Legen Sie die Mittelfußmanschette an und achten Sie darauf, dass das integrierte Polster (B) das Fußbett abdeckt und ob die integrierten Haken richtig auf dem Fußrücken, mit der Öffnung des Hakens (C) nach unten gerichtet, positioniert sind.
2. Haken Sie jetzt den Zuggurt der Orthese fest in den Haken der Mittelfußmanschette ein.
3. Kontrollieren Sie den Stand des Fußes beim Gehen und passen Sie ggf. die Spannung des Zuggurtes an der Orthese an, um eine optimale Wirkung zu gewährleisten.

Angabe des verwendeten Materials

Polyamide, Polyurethan, Baumwolle, Elasthan, Stahl.

Reinigungshinweise / Desinfektionshinweise (DE)

Handwäsche bei max. 30° C warmem Wasser. Nicht bleichen. Nicht chemisch reinigen. Nicht geeignet für den Trockner. Vor dem Waschen bitte alle Klettverschlüsse schließen, so dass das Hakenklettband andere Materialien nicht beschädigen kann und eine optimale Haftung des Klettbands garantiert bleibt.

