

RHIZOCARE

Reinigingsvoorschriften (NL)

Handwas op max. 30°C. Niet bleken. Niet chemisch reinigen. Niet geschikt voor de droogtrommel. Sluit voor het wassen alle klittenbanden om beschadigen aan andere kledingstukken te voorkomen en voor behoud van optimale hechting van de klittenbanden.

Reinigungshinweise / Desinfektionshinweise (DE)

Handwäsche mit max. 30°C-warmem Wasser. Nicht bleichen. Nicht chemisch reinigen. Nicht geeignet für den Trockner. Vor dem Waschen bitte alle Klettverschlüsse schließen, so dass das Hakenklettband andere Materialien nicht beschädigen kann und eine optimale Haftung des Klettbands garantiert bleibt.



Maattabel / Maßtabelle

Artikelnummer (zonder polsband / ohne Handgelenksgurt)		Artikelnummer (met polsband / mit Handgelenksgurt)		Maat / Größe	Lengte / Länge	Polsomvang / Handgelenks- umfang
rechts	links	rechts	links			
8710R-S	8710L-S	8711R-S	8711L-S	Small	15,5 cm	12 – 15 cm
8710R-M	8710L-M	8711R-M	8711L-M	Medium	15,5 cm	15 – 17 cm
8710R-L	8710L-L	8711R-L	8711L-L	Large	15,5 cm	17 – 19 cm
8710R-XL	8710L-XL	8711R-XL	8711L-XL	X-Large	15,5 cm	19 – 21 cm

Maat nemen: circulair, op het breedste deel van de pols

Maßnahmen: zirkulär, an umfangsstärkster Stelle des Handgelenks



8500002 / Stand: 06/2012



Duimorthese | Gebruiksaanwijzing
Daumenorthese | Gebrauchsanleitung

basko.com

Gebruiksrichtlijnen

Uw arts is degene die de polsorthese heeft voorgeschreven en de behandelduur bepaalt. De gestelde dagelijkse gebruiksduur dient nauwkeurig nageleefd te worden. Controleer regelmatig uw huid op drukplekken of andere irritaties en neem direct contact op met uw arts of instrumentmaker indien dit wel het geval is.

Beoogd gebruik van het product / Indicaties

Deze duimorthese wordt zowel voor conservatieve als ook postoperatieve behandeling ingezet en dient ter immobilisatie van het polsgewricht, het CMC1 en het MCP1 gewricht. De orthese is geschikt om bij onderstaande indicaties ingezet te worden:

- Artritis, reumatisch
- Radialis parese
- Bandruptuur (skiduim)
- Wekedelen irritatie
- Distorsie

Extra productinformatie / inzetgebied

De duimorthese is niet geschikt om in zout water gebruikt te worden.

Gebruikersrisico's en contra-indicaties

Er zijn geen gebruikersrisico's of contra indicaties bekend

Onderhoudsadvies

De klittenbanden dienen vrij te blijven van vervuiling, stofresten e.d. om een goede hechting te blijven garanderen.

Samenstellen- en montagerichtlijnen

Aanleggen van de orthese



De balein dient vóór gebruik aangebogen te zijn door een deskundige! Neem de orthese uit de verpakking en open de klittenbanden van de orthese.

- Afb. A:** Trek de orthese aan als een handschoen door deze over uw hand te schuiven. De balein dient langs de buitenzijde tegen de duim aan te liggen. Sluit vervolgens beide klittenbanden op de handrug.
- Afb. B:** Wikkel nu de klittenband om de duim, breng deze op de gewenste spanning en zet deze vast op het lusmateriaal.
- Afb. C:** Wikkel de elastische polsband om de pols, breng deze op de gewenste spanning en zet deze vast op het lusmateriaal. (alleen bij # 8711, uitvoering met polsband)

De orthese dient zo gesloten te worden dat het duim- en polsgewricht ondersteund zijn. Let op dat er geen drukplekken kunnen ontstaan.

Gebruikte materialen

Orthese binnen- en buitenzijde: polyamide met elastaan; Foam: polyurethaan
Klittenbanden: polyamide ; Baleinhoesjes: nylon; Balein: aluminium

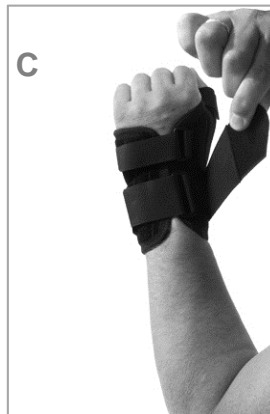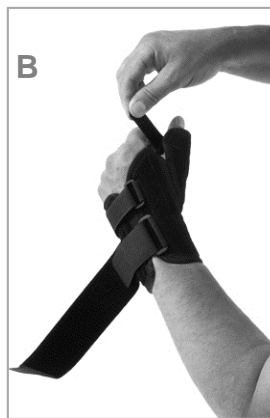

Anwendungshinweise

Ihr Arzt verschreibt die Daumenorthese und bestimmt die Behandlungsdauer. Die ärztliche Verordnung zur täglichen Gebrauchsdauer muss genau beachtet werden. Achten Sie regelmäßig darauf, ob sich Druckstellen oder Hautreizungen bilden und kontaktieren Sie ggf. Ihren Arzt und Techniker.

Zweckbestimmung des Produktes / Indikationen

Die Daumenorthese wird sowohl zur konservativen als auch zur postoperativen Behandlung eingesetzt und dient der Immobilisierung des Handgelenks, des Daumensattelgelenks und des Daumengrundgelenks. Die Anwendung erfolgt bei folgenden Indikationen:

- Arthritis, rheumatoide
- Radialislähmung
- Bandruptur (Skidaumen)
- Weichteilirritation
- Distorsion

Zulässige Betriebsbedingungen / Einsatzorte

Die Daumenorthese darf nicht im Salzwasser eingesetzt werden.

Bestehende Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

Es sind keine Anwendungsrisiken und Kontraindikationen bekannt.

Wartungshinweise

Die Klettbinden sollten vor Verschmutzungen, Stoffresten etc. geschützt werden, um eine gute Haftung zu garantieren

Zusammenbau- und Montageanweisungen

Anlegen der Orthese

Nehmen Sie die Orthese aus der Verpackung, und öffnen Sie die Klettverschlüsse. Das Stäbchen muss im Voraus durch einen Techniker geformt werden!

- Abb. A:** Schlüpfen Sie mit der Hand unter das Strickgewebe in die Orthese hinein. Das Stäbchen sollte auf der Daumenaußenseite anliegen. Schließen Sie die beiden Klettverschlüsse auf der Rückseite der Hand.
- Abb. B:** Wickeln Sie den Klettverschluss um den Daumen bis die gewünschte Spannung erreicht ist und schließen Sie ihn auf dem Flauschgewebe.
- Abb. C:** Wickeln Sie den elastischen Gurt um das Handgelenk bis die gewünschte Spannung erreicht ist und schließen Sie ihn auf dem Flauschgewebe. (Nur für Art.-Nr. 8711, Ausführung mit Handgelenkgurt)

Die Orthese sollte so fest sitzen, dass das Daumen- und Handgelenk ruhiggestellt sind. Jedoch sollte darauf geachtet werden, dass es nicht zu Druckstellen kommt.

Angabe des verwendeten Materials

Ortheseninnen- und -außenseite: Polyamide mit Elastaan; Schaumstoff: Polyurethan; Klettbinden: Polyamide; Taschen: Nylon; Stäbe: Aluminium