


Basko
Healthcare



KiddieGAIT / KiddieROCKER

Dynamische enkel/voethefferorthesen voor kinderen

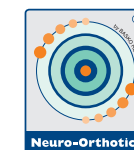

COMPENSEREN VAN FUNCTIONELE BEPERKINGEN BIJ NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN

basko.com

Basko Healthcare

Pieter Lieftinckweg 16 | 1505 HX Zaandam
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13 | Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
E-mail: verkoop@basko.com | Internet: www.basko.com

basko.com

KiddieGAIT / KiddieROCKER

Dynamische enkel/voethefferorthesen voor kinderen

Beoogd gebruik: ter compensatie van een pathologisch looppatroon bij hyper- of hypotonus

Functionele beperking volgens ICF

Gewrichtsbewegelijkheid Gewrichtsstabiliteit Spierkracht Spiertonus Bewegingspatroon tijdens lopen



Productfunctie

- Plantairflexie begrenzing
- Dynamische teenafzet
- Compenseren geringe spierkracht
- Ondersteuning van de kniestrekking tijdens de standfase
- Zijdelingse stabilisatie van het enkelgewricht
- Voetheffing tijdens de zwaafase
- Voorkomen standafwijking

Indicatie

- Hypotone "Crouch Gait"
- Idiopatische tenenloper zonder middenvoetcollaps
- Klapvoet
- Looppatroon afwijking door proprioceptieve aandoening
- Musculaire dystrofie
- Spastische diplegie
- Spina Bifida

Voordelen bij realisatie van therapiedoelstellingen

- Stabiliteit en zekerheid tijdens het lopen
- Voorkomen van letsel aan het houding- en bewegingsapparaat
- Extenderen van de heup en knie
- Ondersteuning van de proprioceptie

Contra indicaties

- Dorsiflexie beperkingen > 5°
- Genu valgum (ernstige mate)
- Genu varum (ernstige mate)
- Pes equinovarus (klompvoet)
- Pes valgus
- Rigide voetstructuur

Kenmerken

- Geconfectioneerd voor individuele aanpassing
- Combineerbaar met schoeninlay's, SureStep of andere DAFO's
- Geen maximaal lichaamsgewicht
- Productgewicht 40 - 90 gr.
- Materiaal: carbon, glas- en kevlarvezels
- Kleur: zwart

Selectiecriteria

KiddieGAIT

Biedt een stabiel en veilig looppatroon – zonder beperking van de beweeglijkheid - en verbetert de proprioceptie en mobilisatie van de lichaamsfuncties.

KiddieROCKER

Wanneer er sprake is van evenwichtsstoornissen en/of een verminderde knie- en heupcontrole biedt de in vergelijking tot de KiddieGAIT meer rigide KiddieROCKER een grotere stabiliteit in de standfase.

Maattabel KiddieGAIT / KiddieROCKER

KiddieGAIT		KiddieROCKER		Maat	Voetplaat lengte	Orthese-hoogte	Effectieve hakhoogte	Schoenmaat
Art. nr. rechts	Art. nr. links	Art. nr. rechts	Art. nr. links					
8619R-XXXS	8619L-XXXS	-	-	XXX-small	110 mm	150 mm	7 mm	< 17
8619R-XXS	8619L-XXS	-	-	XX-small	125 mm	180 mm	7 mm	18 – 21
8619R-XS	8619L-XS	-	-	X-small	140 mm	200 mm	8 mm	21 – 22
8621R-S	8621L-S	8622R-S	8622L-S	small	160 mm	220 mm	8 mm	23 – 26
8621R-M	8621L-M	8622R-M	8622L-M	medium	180 mm	257 mm	9 mm	27 – 29
8621R-L	8621L-L	8622R-L	8622L-L	large	200 mm	295 mm	9 mm	30 – 32
8621R-XL	8621L-XL	8622R-XL	8622L-XL	X-large	210 mm	315 mm	9 mm	33 – 34

Accessoires

SoftKIT

De SoftKIT wordt als voering aan de binnenzijde van de tibia kap aangebracht om druk op het scheenbeen te voorkomen.

ComfortKIT

De ComfortKIT voering dient ook ter ontlasting van druk op het scheenbeen maar is gemaakt uit een „Memory Foam“ en biedt daarmee nauwkeurige ondersteuning en optimale aanpassing aan het lichaam.

SoftSHELL

De SoftSHELL wordt als overtrek over de tibia kap getrokken om druk op het scheenbeen te voorkomen en de orthese „optisch“ kinderlijker te doen voorkomen.

Maattabel accessoires

SoftKIT (per 2 stuks)	ComfortKIT (per 2 stuks)	SoftSHELL (per stuk)		Maat
		Kleur: rose (hartjes motief)	Kleur: grijs (doodskop motief)	
8619/001-XXXS	-	-	-	XXX-small
8619/001-XXS	-	-	-	XX-small
8619/001-XS	-	-	-	X-small
28378-S	28418-S	28358-S	28359-S	small
28378-M	28418-M	28358-M	28359-M	medium
28378-L	28418-L	28358-L	28359-L	large
28378-XL	28418-XL	28358-XL	28359-XL	X-large