

P.E.A.care

Extensie component
Extensionseinstellung



BASKO HEALTHCARE
Pieter Liefinckweg 16
NL-1505 HX, Zaandam

NEDERLAND

Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13
Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
E-mail: verkoop@basko.com

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0) 40 - 85 41 87-0
Fax: +49 (0) 40 - 85 41 87-11
E-Mail: verkauf@basko.com

ÖSTERREICH

Tel.: +43 (0) 1 - 2 83 53 30
Fax: +43 (0) 1 - 2 83 62 62
E-Mail: verkauf@basko.com

P.E.A.care Extensie component

Controleer eerst of de verpakking onbeschadigd en de inhoud compleet is.

Inhoud:

- Extentie component
- 2 schroeven

Stap 1

Draai de centrale as-schroef met de bij de P.E.A.care spalk meegeleverde inbussleutel los en verwijder deze. Neem de twee helften van het extentie component van elkaar (afb. 1).

Let op: naast de centrale as-schroef worden de twee helften ook met een pin bij elkaar gehouden. Bij het lossen van de twee helften kan deze pin eruit vallen. Houd hier rekening mee en raak deze pin niet kwijt (afb. 2).

Stap 2

Schroef nu de helft met de verzonken schroefgaten vast op de orthese (Mendivil) schoen (afb. 3). Gebruik hiervoor de schroeven die met het extentie component zijn meegeleverd. Plaats vervolgens de graden-pin in de gewenste positie (zie onderstaande tabel).

Stap 3

Schroef nu de andere helft van het component vast op de voetplaat van de P.E.A.care spalk w (afb. 4). Gebruik hiervoor de met de P.E.A.care spalk meegeleverde schroeven.

Stap 4

Plaats vervolgens de andere helft tegen de corresponderende positie van de pin en druk de twee helften samen (afb. 5).

Stap 5

Plaats de centrale as-schroef terug en draai deze vast (afb. 6). Herhaal vervolgens de stappen 1 t/m 5 aan de andere zijde van de spalk.

P.E.A.care-Extensionseinstellung

Kontrollieren Sie zuerst, ob die Verpackung unbeschädigt und der Inhalt vollständig ist.

Inhalt:

- Extensionseinstellung
- 2 Schrauben

Schritt 1

Lösen Sie die zentrale Achsschraube mit dem Innensechskantschlüssel, welcher der P.E.A.care-Schiene beiliegt. Trennen Sie die beiden Hälften der Extensionseinstellung voneinander (Abb. 1).

Achtung: Zusätzlich zur zentralen Achsschraube werden die beiden Hälften auch mit einem Pass-Stift zusammengehalten. Beim Trennen der Hälften kann dieser Stift rausfallen. Beachten Sie dies und verlieren Sie diesen Stift nicht (Abb. 2).

Schritt 2

Schrauben Sie nun das Oberteil der Extensionseinstellung mit den versenkten Bohrungen an den Mendivil-Schuh (Abb. 3). Verwenden Sie hierzu die Schrauben, welche der Extensionseinstellung beiliegen. Platzieren Sie dann den Pass-Stift in die gewünschte Position (siehe Tabelle).

Schritt 3

Verschrauben Sie jetzt das Unterteil der Extensionseinstellung auf die Fußplatte der P.E.A.care-Schiene (Abb. 4). Verwenden Sie hierzu die Schrauben, welche der P.E.A.care-Schiene beiliegen.

Schritt 4

Positionieren Sie das Unterteil in entsprechender Position des Pass-Stiftes und drücken Sie die beiden Teile zusammen (Abb. 5).


Schritt 5

Befestigen Sie die zentrale Achsschraube und drehen Sie diese wieder fest (Abb. 6). Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 an der anderen Seite der Schiene.

1.




2.

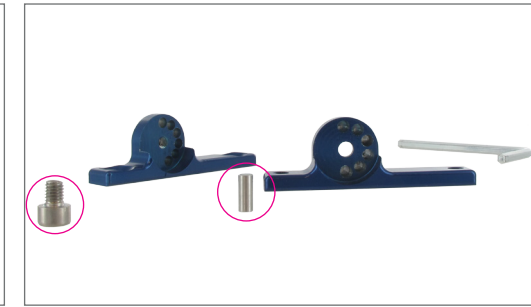

3.



4.

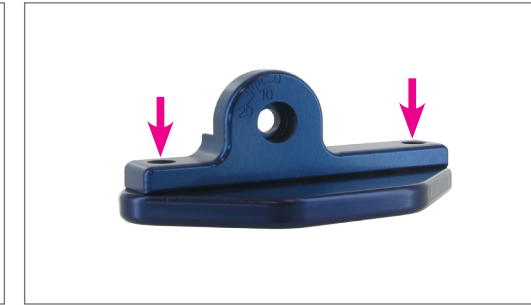

5.



6.



Maattabel - Extensie instellingen

Tabelle - Extensionseinstellung

Positie / Position	Graden / Grad			
1	0°	0°	5°	10°
2	5°			
3	10°			
4	15°	15°	20°	25°
5	20°			
6	25°			